

## Utprovningsprotokoll - Basic Hammock ID-nummer: \_\_\_\_\_

Lyftselen är utprovad till: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

### Instruktioner

1. Placera lyftselen i nivå med svanskotan och höften enligt markeringar på lyftselen.

Vänd individen på rygg och dra fram lyftselen på den andra sidan.




2. Dra fram bendelarna mellan låren.

Kan appliceras i sittande position, följ då punkt 3 och 4.



3. Gör en ögla av bendelarnas röda band. De inre lyftbanden ska sedan träs genom öglet som har bildats.

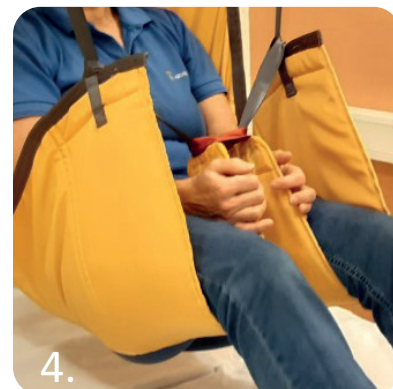

4. De inre lyftbanden ska sedan träs på lyftsels yttre lyftband för att låsa bendelarna på lyftselen, vilket förhindrar urlidning.

*Detta motsvarar korsläggning på vanliga lyftselar.*

### Checklista

#### Lyftsels övre lyftband

Kopplas på yttersta nivå

Kopplas på markerad nivå  \_\_\_\_\_

#### Bindelarnas lyftband

Kopplas på yttersta nivå

Kopplas på markerad nivå  \_\_\_\_\_

#### Individen placeras i rullstolen

Lyftselen tas bort varje gång

Lyftselen kan sitta kvar



Förskrivare \_\_\_\_\_  
Leg. Arbetsterapeut

## Information om lyftselen

Leverantör - Guldmann

Storlek

XS       S       M       L       XL       Annan storlek \_\_\_\_\_

Material \_\_\_\_\_

Uppföljningsintervall \_\_\_\_\_

Anpassning \_\_\_\_\_

---

---

---

---

Övrig information - tänk på säkerhetsstoppet. Lyft tills alla lyftband sträcks och kontrollera att de har monterats korrekt på lyftbygeln.

---

---

---

---

## Utprovningsprotokoll - SIT-ON Comfort ID-nummer: \_\_\_\_\_

Lyftselen är utprovad till: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

### Instruktioner



1. För att säkra centrerung av lyftselen ska markeringen av mittpunkten på lyftselen följa individens ryggrad.

Inskärningen på lyftselen ska placeras vid individens höft.

Vänd individen på rygg och dra fram lyftselen på den andra sidan.



2. Dra de två benbanden, som ligger i fickan, upp mellan knäna och för de två nedre lyftbanden igenom öglorna.



3. Ändra sängens inställning till sittande.

**Lyft med SIT-ON Comfort-selen ska alltid ske från sittande ställning.**

### Checklista

#### Lyftselsens övre lyftband

- Kopplas på yttersta nivå
- Kopplas på markerad nivå  \_\_\_\_\_

#### Bendelarnas lyftband

- Kopplas på yttersta nivå
- Kopplas på markerad nivå  \_\_\_\_\_

#### Individen placeras i rullstolen

De två mittersta benbanden placeras tillbaka i fickan.

Förskrivare \_\_\_\_\_  
Leg. Arbetsterapeut

## Information om lyftselen

Leverantör - Guldman

Storlek

XS       S       M       L       XL       Annan storlek \_\_\_\_\_

Material \_\_\_\_\_

Uppföljningsintervall \_\_\_\_\_

Anpassning \_\_\_\_\_

---

---

---

---

Övrig information - tänk på säkerhetsstoppet. Lyft tills alla lyftband sträcks och kontrollera att de har monterats korrekt på lyftbygeln.

---

---

---

---