

Dokumenttyp Rutin	Ansvarig verksamhet Folktandvården Värmland	Version 1	Antal sidor 1
Dokumentägare Fredric Thyberg Övertandläkare	Fastställare Linda Back Tandvårdschef	Giltig fr.o.m. 2024-02-16	Giltig t.o.m. 2026-02-15

## Förvaring och kontroll av strålskyddsförkläden och kragar

**Gäller för:** Folktandvården Värmland

### Förvaring

Röntgenförkläden och röntgenkragar ska förvaras hängande eller liggande plant eftersom de innehåller en folie som kan skadas vid vikning och då försämras skyddseffekten.

Det finns särskilda vägghängare att köpa som underlättar förvaringen av förkläden.

Kragarna kan hängas över röntgenarmens inre del eller på en metallbåge på väggen.

### Kontroll

Kragar och förkläden ska undersökas årligen så att de inte har några defekter eller slitskador. Känn igenom med händerna så att den inre folien inte har lossnat eller knölat sig och kontrollera att ytterytan är fräsch och med väl fungerande knäppning/kardborre.

Dokumentera i ett Word- eller Excel-dokument när kontrollen är genomförd. Dokumentet ska vara tillgängligt för klinikchefen.

Skadade kragar och förkläden ska kasseras.

*Exempel på Excel-tabell för dokumentation, exemplet avser klinik med 4 kragar och ett förkläde:*

Krage på rum	1	2	3	4	Förkläde	Signatur
Datum för kontroll	2019-01-13	2019-01-13	2019-01-13	2019-01-13	2019-01-13	jues01
	2020-01-20	2020-01-20	2020-01-20	2020-01-20	2020-01-20	jues01
	2021-01-05	2021-01-05	2021-01-05	2021-01-05	2021-01-05	jues01

Om du upptäcker skador mellan kontrollerna ska förklädet/kragen givetvis också bytas ut. Vid osäkerhet om skyddet är skadat eller inte kan sjukhusfysiker kontaktas för genomlysning av skyddet.

**Dokumentet är utarbetat av:** Fredric Thyberg